

APESIN swift




Toepassing en dosering





Gezondheidszorg :


Product aanbrengen op het oppervlak. Inwerktijd respecteren. Verwijder met papier of schoon doekje.

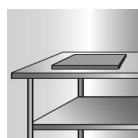

Reinig en spoel de oppervlakken.

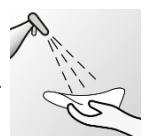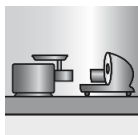

Product aanbrengen op het oppervlak. Inwerktijd respect - eren. Wegnemen met papier of schoon doekje.

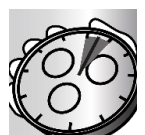

Product moet minstens 2 minuten op het oppervlak blijven.

Desinfectiemiddel op alcohol basis

■ Gebruiksklaar ■ Breed spectrum desinfectans ■ PT2,PT4

- APESIN swift is een gebruiksklaar desinfectiemiddel om kleine oppervlakken te desinfecteren (0.5 m²).
- APESIN swift is toegelaten in Nederland onder n° 15790N
- APESIN swift heeft een dodende werking voor bacteriën en gisten.

Toepassingsgebied

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op:

PT02: Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, oppervlakken (incl. gebruiksvoorwerpen) voor de cosmetische en (para)medische behandeling van mensen en oppervlakken (incl. gebruiksvoorwerpen) voor de cosmetische en veterinaire behandeling van dieren.

PT04: Oppervlakken (incl. apparaten en materialen) welke in contact komen met eet- en drinkwaren (incl. diervoeders) en de grondstoffen hiervoor echter met uitzondering van melkwinningapparatuur op de boerderij.

Ingrediënten: Ethanol, Isopropanol, water.

Sustainable development and production:



Productveiligheids-, opslag- en milieuinstructies

Veiligheid: Enkel voor professioneel gebruik. Niet roken. Voor bijkomende informatie raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

Opslaan: Bij kamertemperatuur in zijn originele verpakking. Verwijderd houden van warmte, warme oppervlakken, vonken, open vuur en ontstekingsbronnen.

Milieu : Enkel volledig lege verpakkingen in de afvalcontainer gooien.

Uw vertrouwde partner:

Verkoopseenheid :

ref.: WM0714962 20 x 500 ml

pH waarde:



APESIN swift

Desinfectie activiteit van APESIN swift

ACTIVITEIT	OMSTANDIGHEDEN	CONTACTTIJD
Bactericide		
EN 1500	-	30 sec.
EN 13727	schoon	5 min.
EN 13697	schoon	5 min.
Levuricide (gisten)		
EN 13624	schoon	5 min.
EN 13697	schoon	5 min.
Fungicide		
EN 13624	schoon	5 min.
EN 13697	schoon	5 min.
Virucide		
EN 14476 - Poliovirus type 1	schoon	5 min.
EN 14476 - Adenovirus type 5	schoon	5 min.
EN 14476 - Norovirus	schoon	5 min.
EN 14476 - Rotavirus	schoon	5 min.

Dit product is in België en het Groot Hertogdom Luxemburg ook toegestaan als fungicide en virucide.